



# AlproCleaner

Hambaraviseadme süljekaasi  
puhastusvahend

150615EE

Leeliselise ja desinfitseeriva toimega  
puhastusaine amalgaami separaatoritega  
varustatud hambaraviseadmete sülje-  
kausside efektiivseks puhastamiseks.

Regulaarne **AlproCleaner**-ga puhastamine  
garanteerib põhjaliku ning seejuures ohutu  
süljekaasi puhtuse.

Lisaks on **AlproCleaner** erinevate materjalide  
suhtes absoluutselt ohutu ning väldib vahu  
tekke nii imusüsteemis kui ka separatsiooni-  
süsteemis.

#### Kasutamine:

Puhastada süljekauss 10 - 20 ml **AlproCleaner**  
toimeainega (mitte lahjendada) ning seejärel  
loputada puhta veega.

#### Uurimustööd:

Prof. Dr. P. Heeg, Tübingen, screening test,  
1996-08

#### Ökoloogiliselt ohutu:

**AlproCleaner** koostisse kuuluvad aineosad  
on biolagunevad vastavalt OECD eeskirjadele.  
Eesmärgiga säästa toorainet pakendamisel  
ning säästa ümbritsevat loodust, soovime  
puhdeli täitmiseks kasutada 5 l cubitainerit.

#### Koostis:

Naatriumhüdroksiid, tensiidid, abimaterjalid



#### Ohutusnõuded:

**Hoiatus.** Põhjustab tugevat  
silma ärritust. Kanda  
kaitseprille/kaitsemaski.  
**SILMA SATTUMISE KORRAL:**  
loputada mitme minuti  
jooksul ettevaatlikult veega.  
Eemaldada kontaktläätsed,  
kui neid kasutatakse ja kui  
neid on kerge eemaldada.  
Loputada veel kord. Kui  
silma ärritus ei möödu:  
pöörduda arsti poole.  
Mitte segada kokku teiste  
puhastus- ja desinfektsiooni-  
vahenditega.

**REF 3121** 500 ml pudel

**REF 3122** 5 l cubitainer

**REF 3123** 5 l kanister



JJJJ-MM

**LOT** 12xxxx

€ 0123

Pakend:

e 500 ml

**ALPRO**<sup>®</sup>  
ALPRO MEDICAL GMBH

ALPRO MEDICAL GMBH ♦ Mooswiesenstr. 9  
78112 St. Georgen ♦ Germany  
T +49 7725 9392-0 ♦ [www.alpro-medical.com](http://www.alpro-medical.com)