

## STERIKING® AC6 keemilised indikaatorid

STERIKING® AC6 keemilised indikaatorid kuuluvad keemiliste indikaatorite klassi 6 ning nad mõõdavad steriliseerimise protsessi käigus kolme kriitilist parameetrit – aega, temperatuur ja auru kvaliteeti.

STERIKING® AC6 keemilisi indikaatoreid saab kasutada järgneva tsükli korral (st. antud indikaator on tsükli põhine):

- 134°C 3.5 minutit

STERIKING® AC6 keemilisi indikaatoreid kasutatakse igas steriliseeritavas kotis, konteineris, korvis või kandikul. Tulemus on loetav kohe peale steriliseerimise protsessi - **värvimuutus rohelisest pruuniks.**

Enne steriliseerimist	STERIKING® AC 6 134°C, 3.5 min	ISO 11140-1:2005, Class 6
		turns brown / braun / brun / marrón / bruno / коричневыми
<b>STEAM</b> Processed =		

  

Peale steriliseerimist	STERIKING® AC 6 134°C, 3.5 min	ISO 11140-1:2005, Class 6
		turns brown / braun / brun / marrón / bruno / коричневыми
<b>STEAM</b> Processed =		