



MinutenSpray

Kiireks desinfitseerimiseks *classic*

Aerosool-desinfektsioonivahend meditsiiniseadmete välispindade nagu turbiinid, nurk- ja sirgotsikud, käepidemed, sangad, laud ja üldise meditsiinilise inventari eriti kiireks desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.

- aldehydide ja fenoolide vaba
- kasutamiskvaliteetne
- VAH/DGHM sertifitseeritud

Toimespekter:

- bakteritsiidne (k.a. TBC, MRSA), fungitsiidne (Candida albicans) toime 1 minuti jooksul
- viirusiinne vastavalt DVV 2012, testitud igapäevases praktikas (carrier test). Efektivne katmata viirustele 2 min jooksul (eriti adeno- ja noro viirus) ja kõikidele kaetud viirustele 30 sek jooksul sh. HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza-gripp, leetrid- ja coronavirus sh. MERS-CoV).

Kasutamine:

Pihustada desinfitseerimist vajavad pinnad ja objektid umbes 30 cm kauguselt ning lasta toimeainel mõjuda vastavalt toime efektiivsusele. Seejärel pühkida pinnad ühekordseks kasutamiseks mõeldud pühkelapiga (nt. **MinutenWipes**).

Kasutamiseks ainult alkoholi suhtes mittetundlike pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Alkoholi suhtes tundlikud pinnad soovitage töödelda selleks spetsiaalselt ettenähtud vahendiga **PlastiSept** eoc.

Uurimustööd:

Prof. Dr. R. Schuberl, Frankfurt/M., VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05 • Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, VAH, 2009-09; viirusiinne vastavalt DVV (2012), 2013-11 • Dr. H. Brill, Hamburg, EN 14561 + EN 14562, 2009-06; MRSA, 2009-07; pika-ajaline efektiivsus/remants sealhulgas EN 13697, 2008-01 • Prof. Dr. P. Heeg, Tübingen, DGHM, 1999-03 • Dr. J. Höffler, Hamburg, EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04 • Dr. J. Steinmann, Bremen, BVD, 2003-11; Vaccinia, 2006-05; Adeno, 2006-05; Coronavirus inkl. MERS-CoV, 2014-05

Koostis:

100 g sisaldab:

45 g etanooli, 15 g isopropanooli, 0,1 g kloorheksidiin-diglükonaati, 0,08 g trialküülethoksi-ammooniumpropionaati, 0,05 g alküüüamiin derivaate



Ohutusnõuded:

Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süütelallikatest. Mitte süstetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole. Mitte segada kokku teiste puhastus- ja desinfektsioonivahenditega ning mitte valada teiste vahendite spray-pudelitesse.

Ökoloogilisel ohutu:

MinutenSpray-classic koostise kuuluvad aktiivsed aineosakesed on biolagunevad vastavalt OECD eeskirjadele. Eesmärgiga kaitsta meid ümbritsevat loodust ja säästa pakendamisel kuluvat toorainemateriale, soovime kasutada täitepakendina 5 l cubitainerit.

REF 3002	500 ml pihusti-pudel
REF 3003	500 ml pihusti-pudel, tühi
REF 3006	500 ml pudelis
REF 4715	1 l pihusti-pudel
REF 3005	5 l kanister
REF 3007	5 l cubitainer



JJJJ-MM




35xxxx

CE 0123

Pakend:

e 5 l

150527EE

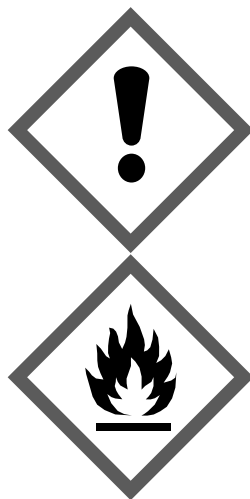

ALPRO MEDICAL GMBH • Mooswiesenstr. 9
78112 St. Georgen • Germany

T +49 7725 9392-0 • www.alpro-medical.com