

1.	Ülevaade	237
2.	Ohutusteave	238
3.	Sümbolite selgitused	239
4.	Lahtipakkimine	240
5.	Paigaldamine ja seadistamine	240
6.	Täitmisjuhised	242
7.	Degaseerimine	243
8.	Kasutusjuhised	243
9.	Puhastusmeetod	245
10.	Tarvikute kasutamine	245
11.	Andmelogi	245
12.	Hooldus	246
13.	Tehnilised andmed	247
14.	Jäätmekäitlus	248
15.	Garantiiteave	249
16.	Tellimisteave	253
17.	Joonised	270

BioSonic® UC150

Ultrahelipuhasti

1. Ülevaade

Teie infektsioonikontrolli süsteemi oluline osa

Õnnitleme teid ultrahelipuhasti BioSonic® ostmise eest – see on hambaravis kasutatav kvaliteetne, äärmiselt tõhus ja populaarne ultrahelipuhastussüsteem.

Spetsiaalselt hambaravitööstusele välja töötatud süsteemi BioSonic seadmete ainulaadne kujundus on mõeldud optimeerima aega ja ohutust nii kontoris kui ka laboris.

BioSonic on täielik ultrahelipuhastussüsteem kõikvõimalike puhastuslahuste ja seadmetarvikutega, mis pakuvad teile paindlikkust instrumentide, proteeside, puuride ja muude seadmete tõhusaks puhastamiseks.

Mis on ultrahelipuhastamine?


Ultrahelipuhastamine on protsess, mis toimub kõrgsageduslike helilainetega. Helilained, mida täiustatakse spetsiaalse koostisega puhastuslahustega, loovad suure energiaga kavitatsiooni. Kavitatsiooni ajal tekivad miljonid pisikesed mullid, mis seejärel ahenevad ehk tõmbuvad plahvatussega kokku, vabastades tohutul hulgal energiat ja lööklaineid, mis hõõruvad instrumentide, seadmete ja muude puhastuslahusesse asetatud vahendite pinda. See võimas küürimistoiming jõuab väikseimatessegi pragudesse, milleni käsitsi harjamisega pole võimalik ulatuda. Energia ja spetsiaalse koostisega lahuste kombinatsioon teeb ultrahelipuhastusest tõhusaima meetodi suurema ja mikroskoopilise prügi eemaldamiseks.

Sihotstarve

Ultrahelipuhasti BioSonic® UC150 on mõeldud meditsiiniseadmete puhastamiseks kõrgsageduslike helilainete kiirgamisega.

2. Ohutusteave

MÄRKUS. Ettevaatusabinõude ja hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või seadmekahjustusi.

 ETTEVAATUST!	<p>Ärge käitage seadet, kui paagis pole piisavalt lahust. Ärge kasutage põhipuhastina üksnes vett. Vee sidumisvõime pole piisav, kui ei kasutata märgamist parandavat ainet. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage ultrahelipuhastuse lahust BioSonic General Purpose, BioSonic Germicidal Cleaner või BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner.</p>
	<p>Ärge asetage esemeid otse paagi põhjale, kuna need võivad kavitatsiooni blokeerida ja põhjustada soojuse kogunemise andurisse, põhjustades enneaegset riket.</p> <p>Kasutage esemete hoidmiseks ainult BioSonic UC150 tarvikukorve, kassetialuseid või mensuure.</p>
	<p>Ärge takistage õhuvoolu. Tagage piisav ventilatsioon, säilitades tagaseinaga vähemalt 5 cm vahekauguse.</p>
	<p>Jälgige, et seade ei saaks põrutusi ega lööke.</p>
	<p>Ärge pange seadet vette.</p>
	<p>Seadme nõuetekohaseks toimimiseks hoidke ekraanipind puhas.</p>
	<p>See toode on mõeldud kasutamiseks ainult väljaõppe läbinud tervishoiutöötajatele.</p>
	<p>Järgige toote kasutamisel käitaja käsiraamatus toodud juhiseid.</p>
	<p>Toote mitteettenähtud viisil või väärkasutamine võib selle ohutust vähendada.</p>
	<p>Enne väärtuslike esemete puhastamist ultraheli abil küsige eseme tootjalt puhastamisega seotud ettevaatusabinõude kohta.</p>
	<p>Klahvistiku toite väljalülitamise nupp ei lülita seadet vooluvõrgust välja. Seadme sulgemiseks lahutage seade elektrikontaktist.</p>
	<p>See seade võib põhjustada raadiohäireid või segada lähedalasuvate seadmete tööd. Võib-olla peate võtma leevendusmeetmeid, nagu seadme ümbersuunamine või ümberpaigutamine või asukoha varjestamine.</p>
	<p>Ärge kunagi tühjendage paaki lahust käsitsi ära visates, kuna see võib põhjustada seadme talitlushäireid.</p>
	<p>Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet või samaväärset juhet, mis on lubatud kasutamiseks temperatuuril 105 °C.</p>
	<p>Ärge võtke seadet koost lahti. Selles pole kasutaja hooldatavaid osi.</p>
<p>Hoidke seade kaetuna, et vähendada lenduvate saasteainete hulka.</p>	
<p>Ärge pange sõrmi ega käsi ultraheliseadmesse, kui see on töös.</p>	
<p>Tagage sobiv saasteainete eemaldamine ohtlike ainete sattumisel seadmestikule või selle sisse seadme avade kaudu.</p>	

**HOIATUS.**

Pikaajalisel töötamisel muutub puhastuslahus väga kuumaks. Põletamise vältimiseks ärge pange käsi lahusesse ega laske sel enda peale tilkuda. Olge eseme paagist eemaldamisel ettevaatlik, kuna see võib samuti kuum olla.

3. Sümbolite selgitused

	Ettevaatust! Kuum pind		Sätete menüü
	Hoiatus/ettevaatust! Vaadake kaasasolevaid dokumente		Logi
	Ettevaatust! Elektrilöögioht		Kuumuti sätted
	Temperatuuripiirangud		Degaseerimismenüü
	Niiskuspierangud		Kuupäeva- ja kellaajasätted
	Kõrvaldada nõuetekohaselt kasutuselt		Keele- ja mõõtmissätted
	Ökopuhastusrežiim		MY (Minu) režiimi sätted
	Tavaline puhastusrežiim		Teave
	Tugev puhastusrežiim		Ekraani sisse-/väljalülitamine
	MY (Minu) puhastus-/kohandatud režiim		Tootja

4. Lahtipakkimine



Joonis 1 UC150 osad ja kirjeldused

- Eemaldage oma BioSonicu seade tarnepakendist ja kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes, mis võisid tarnimise ajal tekkida.
- Võrrelge seadme seerianumbrit (asub kas seadme põhjal või tagaküljel) tarnekarbil oleva numbriga. Kui need pole samad, pöörduge edasimüüja poole.
- **Registreerige oma toote garantii veebilehel: <http://warranty.coltene.com>**

5. Paigaldamine ja seadistamine

Üldine seadistamine

- Valige puhasti jaoks soovitud asukoht. See võib olla kindlal tasasel laual ja valamus või kanalisatsioonitoru lähedal, et hõlbustada tühjendamist. Seadmega tarnitud voolik võimaldab seadme asetada valamust vasakule või ühendada otse kanalisatsiooniga.
- Ühendage vooliku üks ots väljalaskeventiiliga (*joonis 4*) ja pange teine ots valamusse. Soovi korral võite lasta torulukksepal ühendada vooliku otse kanalisatsioonitoruga, kasutades sobivaid liitmikke.
- ÜHENDAGE EKRAAN. Kinnitage ekraanimooduli põhjal olev liitmik seadme paremas ülanurgas asuva liitmikuga. Vajutage ekraanimoodulit ettevaatlikult allapoole, kuni see klõpsab õigesse asendisse.

- ÜHENDAGE SEADE VOOLUVÕRKU. Kinnitage UC150 elektrijuhe seadme tagakülje alaossa ja ühendage kolmejuhtmelisse maandatud vahelduvvoolu pistikupessa (kooskõlas kohalike määrustega) (**joonis 9**). Soovitatav on ühendada seade rikkevoolukaitselülitiga pistikupessa.

Süvistusseadme paigaldusjuhised

- Vajalikud tööriistad
 - Elektritrell
 - Puuriotsak, et puurida tikksae tera mahutamiseks piisav auk
 - Tikksaag ja saetera

MÄRKUS. Selle ultrahelipuhasti peab paigaldama kogenud seadmekäitaja või litsentsitud töövõtja. Järgige kindlasti asutuse kohalikke eeskirju.

MÄRKUS. Enne alustamist lugege läbi paigaldamiseks vajalike tööriistade tootja väljastatud ohutusjuhised ja tehke need endale selgeks.

- Valige puhasti jaoks soovitud asukoht. Tööpinna all peab paagi ümbrise mahutamiseks olema vertikaalset vaba ruumi vähemalt 19 cm (7,5 tolli). Tööpind peab olema tasane ja loodis. Veenduge, et te ei valiks asukohta, kus sahtlid või vertikaalpinnad kappide vahel võivad segama hakata.
- Kinnitage kaasasolev šabloon teibi abil tööpinna soovitud asukohta. Veenduge, et tähis „front of the unit“ (seadme esiküljel) oleks suunatud kasutaja poole.
- Lõigake tikk- või muu saega piki lõikejoont.
- Eemaldage mustus ja saepuru ava ümber ning eemaldage väljalõigatud puidutükki.
- Kinnitage korpusele kummist muhv, et tagada serva ja tööpinna vahel parem püsivus.
- Langetage seade avasse. Veenduge, et korpusele trükitud seadme BioSonic logo oleks suunatud kasutaja poole. (**Joonis 11**)
- Seadmega UC150 tarnitud vooliku abil saate jäätmed kohalike, piirkondlike ja/või riiklike määruste kohaselt kõrvaldada.
- Tühjendusventiili avades saate lahuse lasta jäätmekonteinerisse, et see kooskõlas kohalike, piirkondlike ja/või riiklike määrustega kasutuselt kõrvaldada.




HOIATUS.

(Nende nõuete mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi ja/või seadme kahjustusi.)

Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik ekraani ja paagi ümbrise ning mis tahes tarvikute vahelised ühendused on korralikult kinnitatud.


See seade tuleb nõuetekohaselt maandada. Nõuetekohaselt maandamata seade võib põhjustada raskeid vigastusi.

Seadistussätted

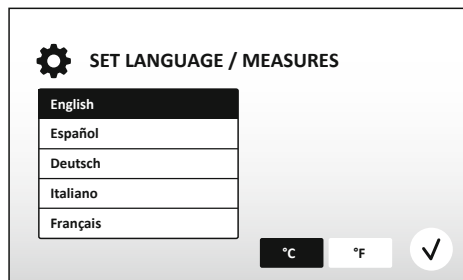

- KEELE JA TEMPERATUURIÜHIKU VALIMINE. Valige ripploendist oma piirkonna keel. Kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Joonis 2 Seadistusküva: keel ja mõõtühikud

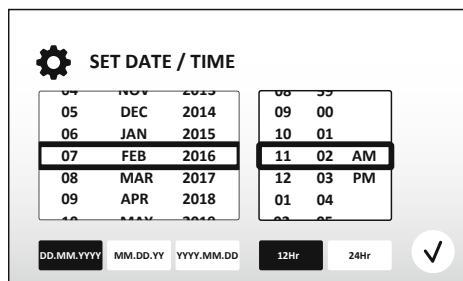


- KUUPÄEVA JA KELLAAJA MÄÄRAMINE. Määrake kuupäev ja kellaaeg soovitud vormingus, kasutades ripploendit ja vormingunuppe. Kinnitamiseks vajutage nuppu ✓. Kasutaja saab valida ühe kolmest kuupäevavormingust:

- DD.MM.YY (PP.KK.AA)
- MM/DD/YY (KK/PP/AA)
- YY-MM-DD (AA-KK-PP)

Joonis 3 Seadistusküva: kuupäev ja kellaaeg

- SEADISTAMINE ON LÕPETATUD. Kui seadistamine on lõpetatud, ilmub põhiküva teie valitud keeles. Teie UC150 on nüüd seadistatud ja kasutamiseks valmis!

MÄRKUS. Kui seadme sätteid on vaja muuta, avage sätete menüü, vajutades seadistusvalikute muutmiseks nuppu .

6. Täitmisjuhised




- Veenduge, et tühjenduskaepide (*joonis 5*) oleks pööratud lõpuni vastupäeva asendisse Closed (Suletud). Täitke seade sooja veega, kuni täitejoone märgini (*joonis 6*). Veenduge, et veetase ulatuks vähemalt minimaalse täitejooneni ega ületaks maksimaalset joont, kui kasutate tarvikuid, nagu mensuurid või korvid.
- Valage paaki vajalik kogus ultraheli puhastuslahust (nt BioSonic General Purpose UC30, BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner UC32) ja vett.
- Vahetage lahust paagis kord päevas või sagedamini, kui see näib olevat määrdunud või selle värv on muutunud. Mensuuri kasutamisel vahetage lahust mensuuris pärast iga kasutuskorda.
- Seadme tühjendamiseks pöörake tühjenduskaepide lõpuni päripäeva asendisse Open (Avatud) ja laske lahusel voolata valamusse või kanalisatsiooni. Loputage paak ja pöörake tühjenduskae-

pide lõpuni vastupäeva asendisse Close (Suletud). Ärge kunagi tühjendage paaki lahust käsitsi ära visates, kuna see võib põhjustada seadme talitlushäireid.

MÄRKUS. Ärge kasutage seadet kunagi ilma lahuseeta. Kuiva paagi käitamine muudab garantii kehtetuks. Ärge asetage esemeid otse paagi põhjale. Kasutage alati tarvikukorve, kassetialuseid või mensuure.





7. Degaseerimine


Lahuse degaseerimine eemaldab suured õhumullid, mis takistavad puhastusprotsessi. Degaseerimine on vajalik iga kord, kui paaki lisatakse uus lahus.


- Vajutage põhikuval degaseerimise ikooni .
- Valige lahuse tüüp, et kanda logisse kasutatud lahus või ainult degaseerimine, ja vajutage degaseerimiseks nuppu .
- UC150 lülitub degaseerimisprotsessi ajal korduvalt sisse ja välja. Taimer loendab aega nullini alates viiest minutist.
- **DEGASEERIMINE ON LÕPETATUD.** Kui taimer jõuab nulli, kuvatakse teade „Degas Completed“ (Degaseerimine on lõpetatud). Lahus on nüüd kasutamiseks valmis. Põhikuvale naasmiseks vajutage nuppu .

8. Kasutusjuhised

Režiimi valimine

- Põhikuvalt saab valida nelja režiimi vahel – 3 eelseadistatud režiimi: ECO (Säästlik) kergete koormuste jaoks, REGULAR (Tavaline) keskmiste koormuste jaoks, STRONG (Tugev) raskete koormuste jaoks ja režiim MY (Minu) kohandatud kasutuseks. (**Joonis 12**)
- **Režiim MY (Minu):** kohandatud režiimi sätete avamiseks valige sätete menüüst ikoon . Määrake soovitud temperatuur ja puhastusaeg. Kui soovite kuumutamist, siis veenduge, et funktsioon HEATER (Kuumuti) oleks olekus ON (Sees). Kinnitamiseks vajutage nuppu .
- Valige režiim, vajutades soovitud koormusele vastavat ikooni. Puhastusükli käivitamiseks vajutage nuppu . Peatamiseks vajutage nuppu . Veenduge, et kaas oleks töötamise ajal suletud. UC150 jätkab puhastamist, kuni taimer loendab kasutaja valitud puhastusaja minuteid nulli.

- Kui taimer jõuab nulli, kuvatakse ekraanil teade „Program Successful“ (Programm oli edukas), kuni vajutatakse mis tahes nuppu. Põhikuvale naasmiseks või toimingu katkestamiseks vajutage nuppu .

MÄRKUS. Puhastusükli saab igal ajal peatada, vajutades käivitus- või peatamisnuppu. Põhikuvale naasmiseks vajutage nuppu .



- Töötamise ajal peab ultrahelipuhasti BioSonic olema alati kaetud, et hoida kinni seadmes olevaid aerosoole. BioSonic UC150 on varustatud hingega kaanega, mis võimaldab seda hõlpsasti ühe käega kasutada. Katte saab ka mugavalt üles tõsta seadme kohal olevate madalate kappide puhastamiseks.

Kuumuti kasutamine

Kuumutusfunktsiooni aktiveerimine





Mudel UC150 on varustatud kuumutiga, et kiirendada paagis oleva lahuse kuumutamist.

MÄRKUS. Paagi sisetemperatuur kuvatakse LCD-ekraani ülariibal.

Nupu  vajutamisel selle funktsiooni aktiveerimiseks ilmub ekraanile uus kuva. Funktsiooni esmakordsel aktiveerimisel peab kasutaja sisestama aktiveerimiskoodi. Kui kood on sisestatud, vajutage nuppu . Nüüd on kuumutusfunktsioon kasutamiseks saadaval.

* Aktiveerimiskoodi hankimiseks külastage veebisaiti <https://biosonic.coltene.com> või saatke klientideenindusele meil aadressil info.ch@coltene.com või info.us@coltene.com

Soovitid temperatuuri seadistamine

- Vajutage nuppu . Seadke temperatuur vahemikus 25 °C (75 °F) kuni 60 °C (140 °F).
- Valige kuumutusfunktsiooni aktiveerimiseks suvand HEATER ON (Kuumuti sees). Vajutage temperatuuri kinnitamiseks nuppu .
- Kui kuumuti olekuks on valitud ON (Sees), kuvatakse põhikuva ülaosas sümbol . Nüüd hakkab kuumuti valitud puhastusrežiimi ajal tööle.
- Kui te kuumutamist ei soovi, valige suvand HEATER OFF (Kuumuti väljas).
- Kui puhastusükli ajal on kuumutamine käimas, kuvatakse põhikuvale vilkuv sümbol . LCD-ekraani ülaosas kuvatakse alati praegune temperatuuriteave.



ETTEVAATUST!

UC150 kuumutusfunktsioon (kui see on lubatud) toimib ainult kuni määratud temperatuurini. Pikemaajalisel kasutamisel jätkab loomulik kavitatsiooniprotsess lahuse kuumutamist soovitud temperatuurist kõrgemale. Kui see juhtub, töötab seade endiselt õigesti.

MÄRKUS. Kasutaja saab sätete menüüs temperatuuriühikuks valida kas C või F.

9. Puhastusmeetodid

Paagis

Korvi puhastamine: asetage puhastatavad esemed korvi või kasutage kassette. (*Joonis 8*) Seejärel asetage korv otse põhipaaki, mis sisaldab puhastuslahust BioSonic General Purpose, Germicidal või Enzymatic Cleaner. Järgige puhastuslahuse sildil toodud doseerimisjuhiseid.

Mensuuris




Spetsiaalsete esemete puhastamine (nt proteesid, puurid): asetage esemed mensuuri ja lisage soovitud puhastuslahust (nt BioSonic Cement Remover või BioSonic General Purpose), järgides toote juhiseid. Riputage mensuur paaki, kasutades mensuurihoidikut, ja asetage mensuuri paigutusrõngas mensuuri ümber, nii et alumine 2/3 oleks põhivannis.

MÄRKUS. Mensuurihoidikut tuleb kasutada koos korviga (*joonis 7*). Kui mensuurid on paigas, olge korvi eemaldamisel ettevaatlik.

10. Tarvikute kasutamine

- **KASSETIKORV.** UC150 korv võimaldab puhastada palju instrumente korraga ja suurendab instrumentide töötlemise tõhusust. Asetage esemed instrumendikassetti või otse korvi põhja. Asetage korv paaki ja puhastage soovitud aja jooksul. Pärast puhastamist loputage korvi ja instrumente põhjalikult voolava vee all.
- **MENSUURIHOIDIK.** Mensuurihoidik mahutab 600 ml klaasmensuuri väikeste osade, puuride või proteeside puhastamiseks. Asetage mensuurihoidik korvi ja pange korv paaki. Asetage paigutusrõngad ümber mensuuri, nii et mensuuri alumine 2/3 oleks põhivannis. Puhastage soovitud aja jooksul.

11. Andmelogi

- LOGI VAATAMINE. Puhasti andmelogi vaatamiseks valige põhimenüüst ikoon  (joonis 12).
- ANDMETE ALLALAADIMINE. Sisestage USB-mälupulk UC150 seadme ekraani vasakul küljel olevasse USB-pesse. Puhasti kasutusandmete allalaadimiseks USB-seadmesse vajutage nuppu . Vajutage andmete allalaadimise kinnitamiseks nuppu . Igakuised andmelogifailid on saadaval USB-failis CSV-vormingus.

12. Hooldus

Puhastamine

Kõiki komponente tuleb puhastada iga päev, pühkides neid pehme lapiga, mida on kergelt niisutatud müügiloleva mineraalsete setete eemaldusvahendiga, ja puhastades seejärel isopropüülalkoholi või lahja desinfektandiga.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage naftapõhiseid lahusteid, jodofoore ega fenoolipõhiseid tooteid. Jodofoorid ja fenoolid võivad jätta seadme pinnale plekke. Pühkige kõik vedelikutilgad kohe ära. Rooste saab paagilt eemaldada müügiloleva roostevaba terase puhastusvahendiga.

Roostevaba terase puhastusvahend

✓ Lubatud

- Peske puhta lapiga, mida on leotatud soojas lahjas seebivees või nõudepesuvedelikus.
- Puhastage alati algsete poleerimisjoonte suunas.
- Pärast puhastamist loputage alati hoolikalt puhta veega (2 või 3 korda). Pühkige korralikult kuivaks.
- Kasutada võib ka kodumajapidamisele mõeldud roostevaba terase puhastusvahendit.

× Vältige järgmist

- Ärge laske mustusel koguneda.
- Terasvilla või roostevabast terasest villa või kaabitsate kasutamine kinnijäänud mustuse eemaldamiseks.
- Karedate või abrasiivsete puhastusvahendite kasutamine.
- Roostevabale terasele ohtlikud kemikaalid, muu hulgas tooted, mis sisaldavad kloriidi, fluoriidi, jodiidi või bromiidi.
- Pleegitit sisaldavad puhastusvahendid.

Kui teil tekib küsimusi dekontaminatsiooni- või puhastusainete sobivuse kohta, pöörduge tootja või tarnija poole.

Toitejuhtme korrapärane kontrollimine

Kontrollige toitejuhet kahjustuste suhtes ja vaadake, kas liitmikud juhtme mõlemas otsas on korralikult paigas.

Sulavkaitsme vahetamine

- Eemaldage toitejuhe kõigepealt seinakontaktist ja seejärel seadme tagaküljel olevast toitejuhtme pesast.
- Sulavkaitsmete pesa asub vahetult toitejuhtme pesa kohal. Sellele juurdepääsuks pistke väike lamepeaga kruvikeeraja kaitsmehoidiku sakkide taha. Suruge kergelt kaitsmehoidiku vabastamiseks (*joonis 9*).
- Eemaldage kaitsmed ettevaatlikult kaitsmehoidikust.
- Kontrollige kaitsmeid (*joonis 10*). Kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uuega, mis vastab seadme pingele ja voolule. Kui kaitse tundub olevat korras, tagastage seade edasimüüjale või ettevõttele Coltène/Whaledent.
- Ühendage toitejuhe seadme tagaküljel olevasse toitejuhtme pesa. Seejärel ühendage toitejuhe seinakontakti.

13. Tehnilised andmed

Keskkonnatingimused

- Mõeldud kasutamiseks siseruumis.
- Maksimaalne kõrgus 2000 m.
- Soovitatud hoiu- ja transporditemperatuur:



- Temperatuur töötamise ajal:



- Suhteline niiskus: 80%@31°C (88°F)
50%@40°C (104°F)



- Vooluvõrgu pingekõikumised ei tohi ületada $\pm 10\%$ nimipingest.
- IEC -60664-1, saasteaste 2.

Elektriteave

- Sisendtoide: 100–240 V vahelduvvool / 50–60 Hz
- Andurid: 2
- Töösagedus: 45–47,5 kHz

- Sulavkaitsme tehnilised andmed: 2 sulavkaitset FST, 5 × 20 mm, aeglaselt sulav, 250 V vahelduvvool, 5 A, IEC 60127-2 leht 3

Max võimsus / sisendpinge			
Sisendpinge	Max võimsus kuumutita*	Max võimsus kuumutiga*	Max voolutugevus
100 V	160 W	425 W	4,3 A
115 V	160 W	510 W	4,4 A
230 V	160 W	510 W	2,2 A
240 V	160 W	540 W	2,3 A

* Keskmine väärtus laotusperioodi vältel

- EMÜ klass A: sobib kasutamiseks kõigis rajatistes peale elamute ja selliste, mis on ühendatud otse madalpingevooluvõrku, mis varustab elektrivooluga hooneid, mida kasutatakse eluruumidena.
- I klassi elektriseade standardi IEC 61140 järgi.
- II pingemuutuse kategooria standardi IEC 61010 järgi.

Mehaaniline teave

Paagi maht	6,6 l (1,75 USA gallonit)
Kasutatav maht	5,7 l (1,5 USA gallonit)
Üldised mõõtmed	P × L × K = 34,5 × 27,6 × 35,5 cm (13,6 × 10,8 × 14 tolli) (koos ekraaniga)
Paagi mõõtmed	28,7 × 16,0 × 17,8 cm (11,3 × 6,3 × 7 tolli)
Tööpinna kohal	34,5 × 27,6 × 17,2 cm (13,6 × 10,8 × 6,8 tolli)
Tööpinna all	32,9 × 26 × 18,3 cm (13 × 10,2 × 7,2 tolli)

14. Jäätmekäitlus



BioSonic® UC 150 on elektriseade, mis tuleb kasutuselt kõrvaldada kohalike seaduste ja määruste järgi.

Selle seadmel on tähis Euroopa kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivi 2012/19/EL kohaselt (elektroonikaromude direktiiv, WEEE). Need kogu Euroopas kohaldatavad suunised määratlevad raamistiku kasutatud seadmete tagastamiseks ja ümbertöötamiseks. Tootel või tootega kaasas olevatel dokumentidel olev sümbol näitab, et seda seadet ei tohi käidelda olmejäätmena. Selle asemel tuleb see viia sobivasse elektroonikaromude kogumispunkti.

15. Garantiiteave

UC150 on välja töötatud kasutamiseks hambaravis ja seda tohivad käitada ainult hambaravispetsialistid kooskõlas selles käsiraamatus toodud juhistega. Vaatamata mis tahes selles sisalduvale teabele vastutab kasutaja siiski alati ainuisikuliselt toote sihtotstarbele sobivuse kindlakstegemise ja kasutusviisi eest. Mis tahes juhtnöörid rakendustehnoloogia kohta, mida pakub tootja või levitaja või mida pakutakse nende nimel, olgu kirjalikud, suulised või esitletavad, ei vabasta hambaravispetsialisti kohustusest kontrollida toodet ja teha kõiki selle kasutamiseга seotud ametialaseid otsuseid.

See toode on valmistatud ülimalt hoolega ja vastab rangeimatele kvaliteedinõuetele. Meie tooted on valmistatud uutest osadest või uutest ja töökorras kasutatud osadest. Meie garantiitingimused kehtivad sellest olenemata. Kui kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast ilmneb seadmel mõni materjali- või tootmisdefekt, parandatakse või asendatakse see ettevõtte Coltène/Whaledent äranägemisel. Mis tahes komponentide rikkumise, väärkasutuse, hooletuse, muutmise, veekahjustuse, avarii või mõistliku või nõuetekohase hoolduse tegematajätmise korral muutub see garantii kehtetuks. Kui toote kasutamisel ja/või hooldamisel ei järgita selles käsiraamatus toodud juhiseid, muutub see garantii kehtetuks.

EESPOOL NIMETATU ASENDAB KÕIK OTSESED VÕI KAUSSED GARANTIID, MUU HULGAS KÕIK MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID.

COLTÈNE/WHALEDENT AG EI VÕTA MINGIT VASTUTUST TOOTE VALDAMISEST VÕI KASUTAMISEST TINGITUD EBAMUGAVUSTE, KADUDE, VIGASTUSTE EGA OTSESTE, KAUSETE VÕI TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST.

Mis tahes nõuded transpordi ajal tekkinud kahjustuste või purunemiste eest tuleb esitada transpordiettevõttele. Kui vajalik on hooldus tehases, pakkige seade kindlasti nõuetekohaselt ning saatke ettemakstult ja kindlustatuna tehasesse tagasi.

PIIRATUD GARANTII TUNNISTUS

Coltène/Whaledent garanteerib, et see toode on kahekümne nelja (24) kuu jooksul alates algsest ostukuupäevast materjali- ja tootmisdefektideta. Selle garantiiperioodi vältel kohustub Coltène/Whaledent selle toote oma äranägemisel parandama või asendama, kui toode ei toimi normaalsel töö- ja kasutustingimustel nõuetekohaselt, mis viitab asjaolule, et rike on tingitud ainult tootmis- või materjalidefektist.

Garantii ei kata järgmist.

- Avarii, kuritarvitamise, väärarvitamise, hooletuse, muutmise, transpordi, tootja juhiste mittejärgimise, mõistliku ja nõuetekohase hoolduse tegematajätmise või vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahjustused.
- Tavapärase kulumine (pirnid, sulavkaitsmed jne).
- Väiksemad puudused, mis ei mõjuta toote jõudlust.
- Olukord, kui toodet kasutab keegi teine peale litsentsitud hambaarsti või kvalifitseeritud suuhügienist.

Garantii muutub kehtetuks, kui toodet on püüdnud parandada või hooldada mis tahes isik, kellele Coltène/Whaledent pole selleks luba andnud, või kui parandamiseks või hooldamiseks on kasutatud ettevõtte Coltène/Whaledent loata osi.

See garantii asendab kõik muud tootega seotud otsesed või kaudsed garantiid, muu hulgas kõik müügikõlblikkuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kaudsed garantiid. Coltène/Whaledent ei vastuta mingil juhul otseste, kaudsete, õigusvastaste, iseloomulike, karistulike, spetsiaalsete, juhuslike ega tagajärgedest tulenevate kahjude eest, mis on tingitud toote valdamisest või kasutamisest, muu hulgas toote kasutusvõimaluse kadumise, tulu või kasumi kadumise või asendustoote kulu eest. Siin toodud piirangud teenivad ettevõtte Coltène/Whaledent tarnijate ja töövõtjate huve.

See piiratud garantii tunnistus kehtib ainult juhul, kui sellele on kantud ostukuupäev ja edasimüüja nimi.

Kui garantiiperioodi jooksul ilmneb selle toote defektsus, tuleb see koos piiratud garantii tunnistuse ja kirjaliku garantiinõudega esitada ettevõtte Coltène/Whaledent edasimüüjale, kellelt see algselt osteti. Kõik garantiinõuded peavad sisaldama väidetava defekti üksikasjalikku kirjalikku kirjeldust. Ostja vastutab kõigi transpordiga seotud kulude ja riskide eest ning seetõttu soovitage pakkida toote hoolikalt ja saata edasimüüjale kogu väärtuse ulatuses kindlustatuna.

Toote garantii registreerimiseks on kaks võimalust.

1. Saatke järgmine teave aadressile

Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten / Šveits

Ostja nimi ja aadress:

Edasimüüja nimi ja aadress:

Telefon:

E-post:

Mudeli number:

Ostukuupäev:

Seerianumber:

2. Registreerige oma toote garantii veebilehel: <http://warranty.coltene.com>

16. Tellimuse teabe üksikasjad

	REF nr*	Kirjeldus	Kogus
UC150 sead- med	60021987	UC150 puhastusseade USA pistikutüübiga A	1
	60021988	UC150 puhastusseade Euroopa pistikutüübiga F	1
	60021989	UC150 puhastusseade Ühendkuningriigi pistikutüübiga G	1
	60021990	UC150 puhastusseade Austraalia pistikutüübiga I	1
	60022047	UC150 puhastusseade Jaapani pistikutüübiga AJ	1
	Tarvikukomplekt	60022042	Korv, mensuurid (2), katted (2), paigutusrõngad (2), mensuurihoidikud (2)
Tarvikud	60022040	Kassetikorv 26,8 × 15,8 × 11,5 cm (10,4 × 6,2 × 4,4 tolli)	1
	60022041	Mensuurihoidik	1
	UC53	600 ml mensuur koos katte ja paigutusrõngaga	1
	60022043	UC150 asendus-tühjendusfiltrid	3
	60022044	UC150 asendus-tühjendusvoolik	1
	60022045	UC150 asenduskaas	1
	60022046	UC150 tihend	1
Ultrahelilahu- sed	UC30	Üldotstarbelise puhastuslahuse kontsentraat jaotur- pudelis MeterDose®	473 ml / 16 untsi
	UC31	BioSonic üldotstarbeline puhastusvahend pluss Su- per Rust Inhibitor	15 ml × 20
	UC32	Ensümaatiline kontsentraat ultrahelipuhastile jaotur- pudelis MeterDose	236 ml / 8 untsi

	REF nr*	Kirjeldus	Kogus
	UC34	Kipsi ja hambakivi eemalduspulbri kontsentraat purgis	840 g / 1,85 naela
	UC38	Bakteritsiidne kontsentraat ultrahelipuhastile jaoturpudelis MeterDose	236 ml / 8 untsi
	UC39	Tsemendieemaldusvahendi kontsentraat jaoturpudelis MeterDose	473 ml / 16 untsi
	UC42	Bakteritsiidne kontsentraat ultrahelipuhastile jaoturpudelis MeterDose	473 ml / 16 untsi
	60021960	UC40 universaalne kontsentraat ultrahelipuhastile, 1 l dosaatoriga pudel*	1 l
	60021961	UC40 universaalne kontsentraat ultrahelipuhastile, 5 l täitekann*	5 l

* Saadaval ainult Euroopas